


VH202過氧化氫滅菌試紙條(GPS-250R)

VH202 INDICATOR STRIP

(訂購編號GPS-250R) VH202過氧化氫滅菌試紙條 (紅色變成藍色)

250片/盒

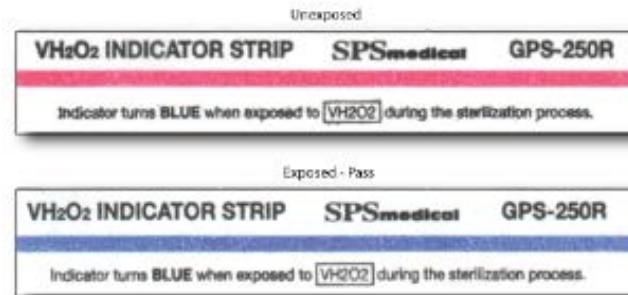

使用目的:

當遵照指示使用時，GPS-250R VH202過氧化氫滅菌試紙條紅色會改變成藍色是明確指示出這個指示條已經經過VH202過氧化氫滅菌器處理過了。

GPS-250R VH202過氧化氫滅菌試紙條當暴露在VH202過氧化氫滅菌器中過氧化氫擴散階段的六分鐘內會呈現紅色會改變成藍色的顏色改變。

使用說明:

1. 在每一個要被VH202過氧化氫滅菌器滅菌的滅菌包、滅菌袋、或滅菌盤中放一條GPS-250R VH202過氧化氫滅菌試紙條。
2. 在VH202過氧化氫滅菌器滅菌器中一如往常的作滅菌。
3. 在VH202過氧化氫滅菌器滅菌週期完成之後，觀察比對GPS-250R VH202過氧化氫滅菌試紙條是否已經從紅色改變成藍色。
4. 如果沒有從紅色會改變成藍色的話，指示出不適當的滅菌條件，這個試紙條在VH202過氧化氫滅菌器滅菌過程中沒有適當的暴露在過氧化氫中。

注意:

如果紅色不紅的話請勿使用。請勿將此試紙條儲存在靠近氧化劑的地方，例如含氯的漂白水、過氧化氫、過氧乙酸等。

績效特性:

符合ANSI/AAMI/ISO 11140-1績效需求。

穗滿企業股份有限公司

台北市忠孝東路4段162號5樓之3

服務電話：(02) 2731-7727

傳 真：(02) 2731-8221

s111@bge.com.tw; s119@bge.com.tw;

www.bge.com.tw

中華民國 107 年 3 月 12 日校譯